

ORIENTACIÓN GENERAL de USO

Cartas de HART para V.L.

Ref: 9538-1/9538-3/9538D-1/9538N-1



Útiles: Carta de Hart para Visión Lejana.

Objetivo Principal: proporcionar una serie de elementos acomodativos de mayor o menor dificultad, para su identificación en visión lejana.

Modo de empleo básico:

- Situar y fijar a la pared o a una pizarra, con adhesivo o elementos imantados, a la altura que se considere correcta, según el protocolo de entrenamiento que se esté realizando. Como orientación, comenzar con la altura al nivel de los ojos del paciente. Posteriormente, ir variando la altura según el protocolo o funciones a entrenar.
- Alejar al paciente de la Carta de Hart la distancia que se requiera, según el protocolo y según la A.V. del paciente. Como orientación, la distancia a de ser como mínimo, mayor de 40 cm; distancia sugerida inicial: 1 m.
- Pedir al paciente que comience a leer/identificar los elementos de la Carta de Hart, por filas, por columnas, a ritmo, saltando, alternando entre V.L y V.P. , con elementos vergenciales interpuestos, ..., dependiendo del protocolo realizado por el profesional sanitario responsable del entrenamiento.

Es importe durante toda la prueba o entrenamiento evitar los reflejos luminosos sobre la Carta y proporcionar una correcta iluminación en toda la Carta, para anular cualquier confusión al paciente debido a estos efectos.

Para su almacenaje mantenga este artículo en un sitio fresco y seco. Evite la incidencia de la luz solar directa, ya que puede llegar a dañar el material.

Este documento pretende aportar una información orientativa inicial para el empleo de este material. El uso de este material ha de ser realizado bajo la supervisión e indicaciones de un profesional de la visión.